

Schritt für Schritt Anleitung für den Coronatest

Jeder Schüler*in sollte folgende Komponenten erhalten:

Komponenten des Testkits

Teststreifen



Verpackungsbeutel und Trockenmittel



Extraktionspuffer Röhrchen und Spenderkappe



Steriler Abstrichtupfer (Marke: Miraclean, P/N 93050)



Diese Komponenten sollten Sie zur Testdurchführung vor sich haben:

- Teststreifen (einzeln verpackt im Verpackungsbeutel mit Trockenmittel)
- Röhrchen mit Extraktionspuffer
- Spenderkappe
- Steriler Abstrichtupfer (Marke: Miraclean)

Was Sie noch zusätzlich benötigen:

- Stoppuhr

Instruieren Sie folgende Schritte chronologisch:

Vorbereitung


- 1) Lassen Sie die Schüler*innen überprüfen, ob der Test noch haltbar ist. Das Verfallsdatum steht auf der Rückseite des Verpackungsbeutels.




- 2) Öffnen Sie den Verpackungsbeutel an der Einrislinie. Entnehmen Sie den Teststreifen und das Trocknungsmittel.
- 3) Überprüfen Sie, ob der Teststreifen unversehrt und die Statusanzeige des Trocknungsmittel die Farbe gelb anzeigt. Gelb bedeutet der Test ist geeignet.

Abstrich vornehmen

- 4) Entnehmen Sie den Abstrichtupfer aus der Verpackung. **Achtung:** Halten Sie diesen am Griff fest, berühren Sie nicht den Wattebausch.
- 5) Führen Sie den Wattebausch parallel zum Gaumen ca. 2 cm in ein Nasenloch ein bis sie einen Widerstand spüren. **Üben Sie keinen Druck aus.** Drehen Sie den Tupfer an dieser Stelle viermal (ca. 15 Sekunden). Entnehmen Sie den Tupfer.

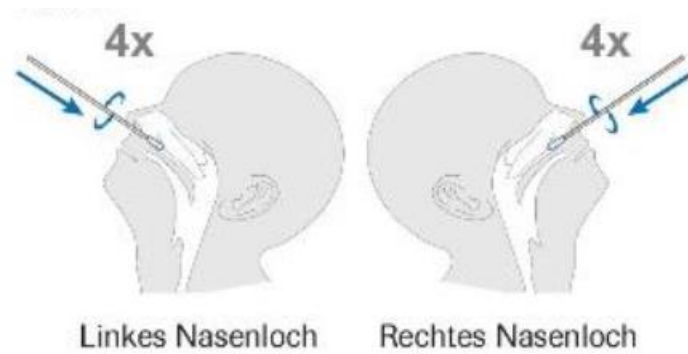

- 6) Wiederholen Sie Schritt 5 mit dem gleichen Tupfer im anderen Nasenloch.
- 7) Öffnen Sie das Röhrchen und stecken Sie den Tupfer hinein.
- 8) Wenn der Tupfer ganz im Röhrchen steckt, drücken Sie das Röhrchen zusammen und drehen Sie den Tupfer 10mal.

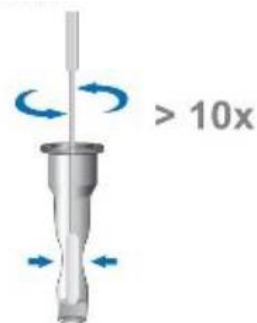

- 9) Drücken Sie die Seiten des Röhrchen zusammen, während Sie den Tupfer entnehmen, um alle Flüssigkeit im Röhrchen zu behalten.




- 10) Verschließen Sie das Röhrchen mit der Spenderkappe.



Test Durchführung

- 11) Legen Sie den Teststreifen auf eine ebene Fläche.
- 12) Halten Sie das Röhrchen senkrecht über das rund markierte Feld.
- 13) Tropfen Sie 4 Tropfen in das markierte Feld.

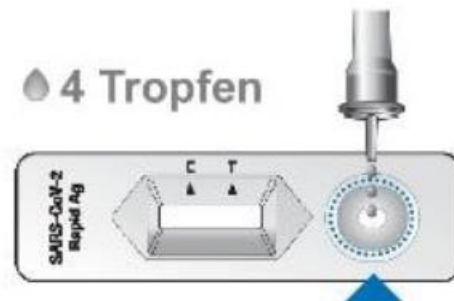

Warten Sie 15 Minuten

Auswertung

